

IMPRESSION MATERIAL

Panasil




شرکت تهران اتکال
TEHRAN ETTEKAL CO.

A-Silicon

Precise, even in **extreme situation**

بسیار دقیق، حتی در **سخت ترین شرایط**

- ✓ مواد قالبگیری A-silicon بر پایه پلی ونیل سیلوکزان
- ✓ آبدوست بدون ایجاد تداخل عملکرد در مواجهه شدن با رطوبت دهان
- ✓ صرفه جویی در زمان که مورد رضایت بیمار و پزشک است.
- ✓ نفوذ کاملاً یکنواخت در شیارها و ثبت دقیق جزئیات در لبه ها
- ✓ قوام بسیار مناسب در واش ها و عدم ریزش مواد حتی در نوع Very Low Viscosity
- ✓ عدم تغییر حجم تا ۲۱ روز (ثبات ابعادی)
- ✓ اختلاف رنگی قابل تشخیص در ترکیب ها (قالبگیری های دو مرحله و تک مرحله)
- ✓ خاصیت الاستیک بسیار عالی و غیر چسبنده و کاملاً انعطاف پذیر
- ✓ دقت بسیار بالا و حداقل زمان مورد نیاز جهت ست شدن در دهان بیمار

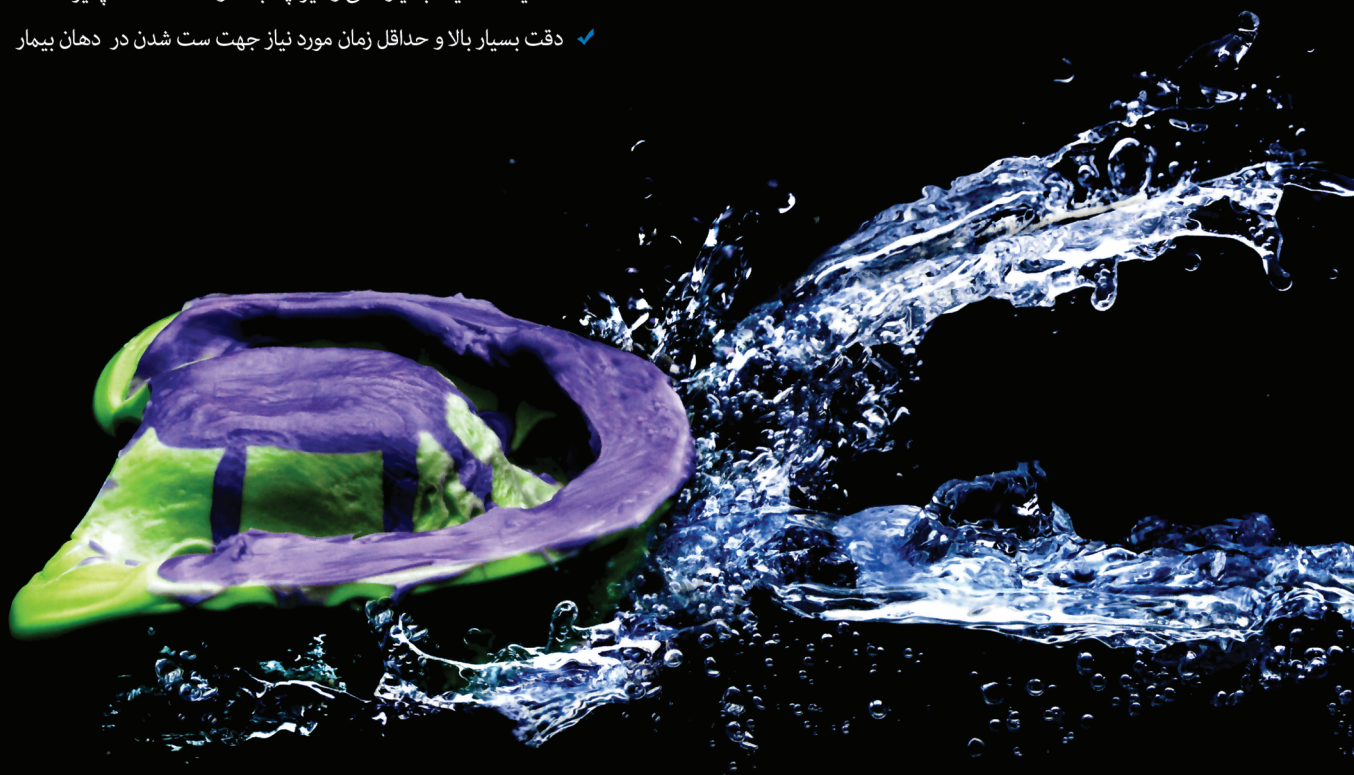

Panasil® Putty Soft




- ✓ پوتی Soft
- ✓ قالبگیری دقیقی با حداقل زمان
- ✓ مناسب جهت استفاده به همراه Regular و Light
- ✓ قابل استفاده در قالبگیری های یک و دو مرحله ای (ترجیح بیشتر برای یک مرحله ای)
- ✓ موارد استفاده: پروتز ثابت و ایمپلنت



نسبت اختلاط	Working Time در ۲۳°C	Intraoral Setting Time در ۳۵°C	Total Setting Time	ضریب سختی (Shore)	درصد تغییر ابعاد خطی
۱:۱	۲ دقیقه	۲ دقیقه	۴ دقیقه	A 60	-۰,۲۰

نام محصول	ISO 4823	ثبات (Consistency)	نسبت اختلاط و حجم ماده در هر کارتریج	نحوه میکس	رنگ	بو و طعم
پوتی Soft	نوع صفر پوتی	۲۴	۱:۱ قوطی ۹۰۰ ml	دستی، یک پیمانه از (۱۲,۳ ml) Hardener و Base	زرد	طبیعی

Panasil® Putty Fast

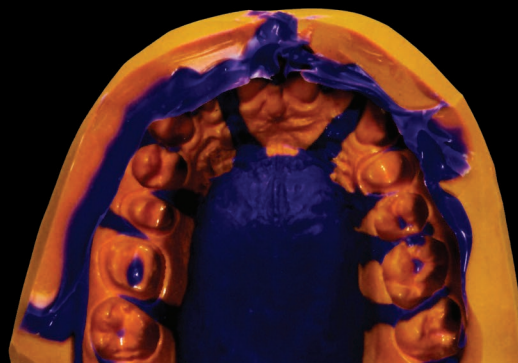


- ✓ پوتی Hard
- ✓ قالبگیری دقیق و سریع
- ✓ بسیار مناسب جهت قالبگیری دو مرحله ای همراه با واش X-Light
- ✓ موارد استفاده :
- ✓ انواع قالبگیری پروتز ثابت
- ✓ مدت زمان ست شدن داخل دهان بیمار تنها ۲ دقیقه می باشد.



نسبت اختلاط	Working Time در ۲۳°C	Intraoral Setting Time در ۳۵°C	Total Setting Time	ضریب سختی (Shore)	درصد تغییر ابعاد خطی
۱:۱	۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه	۲ دقیقه	۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه	A 66	-۰,۲۰

نام محصول	ISO 4823	ثبات (Consistency)	نسبت اختلاط و حجم ماده در هر کارتریج	نحوه میکس	رنگ	بو و طعم
پوتی Fast	نوع صفر پوتی	۲۴	۱:۱ قوطی ۹۰۰ ml	دستی، یک پیمانه از (۱۲,۳ ml) Hardener و Base	زرد اکرایلی	طبیعی

Panasil® contact X-Light

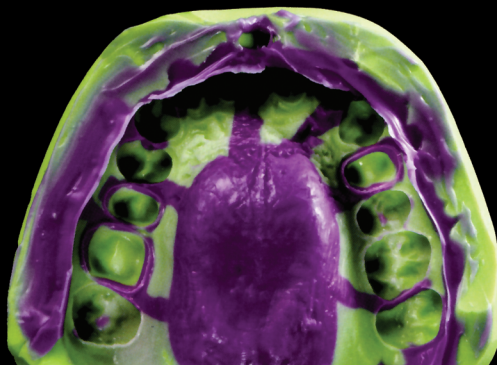

✓ واش Very Low Viscosity

✓ کاملاً آبدوست با بهترین عملکرد در محیط مرطوب دهان

✓ تکنیک پیشنهادی: قالبگیری یک مرحله و دو مرحله ای (به خصوص دو مرحله ای)

✓ موارد استفاده: قالبگیری پروتز ثابت



✓ دقت فوق العاده بالا و عدم ایجاد تداخل عملکرد در حضور رطوبت دهان

✓ مدت زمان ست شدن داخل دهان بیمار ۲:۳۰ دقیقه



نام محصول	نسبت اختلاط	Working Time در ۲۳°C	Working Time در ۳۵°C	Intraoral Setting Time در ۳۵°C	Total Setting Time	ضریب سختی (Shore)	درصد تغییر ابعاد خطی
X-Light	۱:۱	۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه	۱ دقیقه	۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه	۴ دقیقه	A 46	-۰,۲۰
X-Light Fast	۱:۱	۱ دقیقه	۳۰ ثانیه	۲ دقیقه	۳ دقیقه	A 46	-۰,۲۰
نام محصول	ISO 4823	ثبات (Consistency)	نسبت اختلاط و حجم ماده در هر کارتریج	نحوه میکس	ابزار مورد نیاز	رنگ	بو و طعم
X-Light	نوع ۳، Light Body	۴۴	۱:۱ کارتریج ۵۰ ml	گان ۴	نوک مخلوط کن ۴,۲ mm	بنفش	طبیعی
X-Light Fast				۲:۱ / ۱:۱			

Panasil® initial contact Light

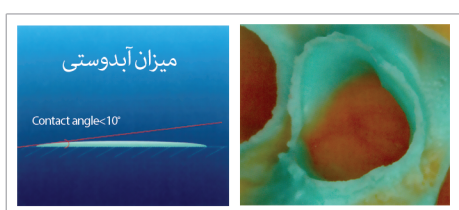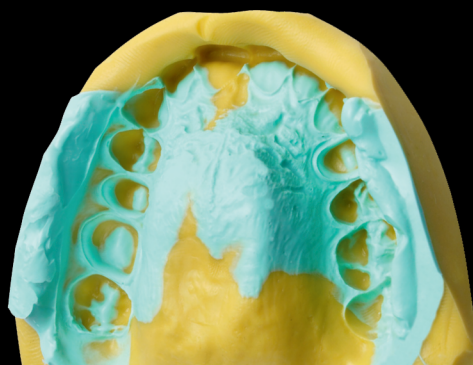

- ✓ واش Low Viscosity جهت استفاده با انواع پوتی
- ✓ آبدوستی بسیار عالی و غلبه بر محیط مرطوب دهان
- ✓ تکنیک قالبگیری پیشنهادی: قالبگیری یک (پوتی و واش همزمان) و دو مرحله ای
- ✓ موارد استفاده: انواع قالبگیری پروتز ثابت و بخصوص ایمپلنت



نام محصول	نسبت اختلاط	Working Time در ۲۳°C	Working Time در ۳۵°C	Intraoral Setting Time در ۳۵°C	Total Setting Time	ضریب سختی (Shore)	درصد تغییر ابعاد خطی
Light	۱:۱	۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه	۱ دقیقه	۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه	۴ دقیقه	A 46	-۰,۲۰
Light Fast	۱:۱	۱ دقیقه	۳۰ ثانیه	۲ دقیقه	۳ دقیقه	A 46	-۰,۲۰
نام محصول	ISO 4823	ثبات (Consistency)	نسبت اختلاط و حجم ماده در هر کارتریج	نحوه میکس	ابزار مورد نیاز	رنگ	بو و طعم
Light	نوع ۳، Light Body	۴۱	۱:۱ کارتریج ۵۰ ml	گان ۴	نوک مخلوط کن ۴,۲ mm	سبز	طبیعی
Light Fast				۲:۱ / ۱:۱			

Adhesives



Panasil Adhesive ✓

✓ چسب مواد قالبگیری A-silicone جهت چسبیدن به فلز و اکریلیک

✓ استفاده آسان با براش

✓ زمان کوتاه جهت خشک شدن



Panasil

مواد قالبگیری A-Silicon



شرکت تهران اتکال

www.tehranettekal.com

۰۲۱-۸۷۷۶۴

تهران، خیابان مطهری
خیابان میر عماد، کوچه
سیزدهم، پلاک ۱۲، واحد ۳



tehranettekal

آدرس دفتر فروش: خیابان شهید بهشتی، نرسیده به اتوبان مدرس، ساختمان کلاسیک،
پلاک ۲۵۱، طبقه ۱، واحد شرقی

نمایندگی های فروش:

۰۲۱-۶۶۴۲۰۱۱۹
۰۳۱-۳۶۶۳۳۹۳۹
۰۴۱-۳۳۳۶۹۴۴۴
۰۶۱-۳۲۲۱۴۶۲۲
۰۳۵-۳۷۲۴۳۹۴۶
۰۷۶-۳۲۲۵۱۰۶۰

آقای جواهر ساز
آقای خرم
آقای نصیری
آقای زرگر حسینی
آقای دهقانی
آقای عرب پور

تهران: فروشگاه گنجینه
اصفهان: شرکت سایا
تبریز: کالای کالج
اهواز: کالای دندان پزشکی نوید
یزد: منصف طب
بندرعباس: منصف طب