

از سال ۲۰۰۰
GOLD STANDARD

CLEARFIL SE BOND™

باندینگ سلف اچ (نسل ۶)



Clearfil SE Bond یک سیستم باندینگ لایت کیور ، حاوی پرایمر Self-etch و یک عامل باندینگ می باشد. پرایمر بر پایه آب ، آماده سازی همزمان مینا و عاج در یک مرحله را امکان پذیر می سازد . مونومر MDP به حذف حساسیت پس از ترمیم کمک می کند .

ویژگی ها :

- شروع نسل ۶ باندینگ ها
- سلف اچ (بدون نیاز به اچ و شستشو)
- سیل مارجینال بهتر به دلیل استحکام باند بسیار بالا
- پرایمر Self-etch بر پایه آب و سازگار با پالپ
- بدون حساسیت تکنیکی
- حاوی مونومر MDP
- بدون حساسیت پس از ترمیم
- استفاده بی خطر ، سریع و آسان
- بدون دکلسیفیکاسیون بیش از حد
- قابل استفاده برای کامپوزیت ها ، کامپومرها و ormocers

موارد کاربرد :

- قابل استفاده برای تمام کامپوزیت های لایت کیور
- برای سیل کردن توبول های عاجی قبل از تحویل اینله وآنله (فلزی یا سرامیکی)
- قابل استفاده برای حساسیت های تحلیل لثه
- ترمیم پرسلن شکسته
- قابل ترکیب با سایلن پرسلن

آماده سازی سطوح سرامیکی :

وقتی یک رستوریشن ساخته شده از سرامیک هیبرید یا کامپوزیت ، مدنظر است ، باید ابتدا برای بهتر ساختن خصوصیات سطحی سرامیک ، روی آن از سایلن استفاده کرد . برای ساخت سایلن ، یک قطره از پرایمر Clearfil SE Bond با یک قطره از Clearfil Porcelain Bond Activator (سایلن پرسلن) در یک ظرف مخصوص مخلوط می گردد. محل مورد نظر را با محلول به مدت ۵ ثانیه آغشته نمایید و سپس با هوای ملایم خشک کنید.

* دستور کار فارسی در هنگام تهیه محصول تقدیم میگردد .

2012
REALITY
DENTAL
QUALITY'S
PIONEER

